


70*95mm

封面

CE-3500

超声波隐形眼镜清洗机

使用手册

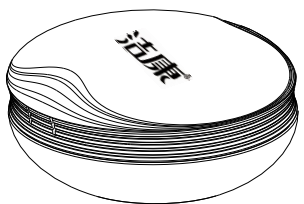


- 请在使用本产品前阅读《使用手册》
- 请保存好此《使用手册》

【产品名称】

洁康隐形眼镜清洗机CE-3500

【结构】

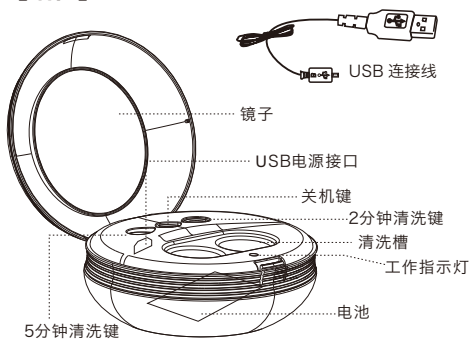

【适用范围】

本品适用于清洗所有隐形眼镜，可与任何品牌的隐形眼镜护理液配套使用。

①

【警告】

- 1.除功能水、生理盐水及纯净水外，不得在清洗槽中加入其它化学药剂。
- 2.槽内加水适量，避免水溢出槽外。
- 3.避免产品空烧，否则会损坏产品。
- 4.禁止用水冲洗整个产品，以防发生漏电或损坏机器。
- 5.若清洗机未能正常工作，禁止继续操作，非专业人员请勿轻易拆装产品。
- 6.本品仅用于清洗隐形眼镜。
- 7.镜片的细微破损或划痕，有时是不为肉眼所见的，但仍可能影响佩戴舒适性和镜片寿命。本品清洗是无法修复的，故请您避免以下不利因素：过长指甲、使用尖锐钳子、镜片一旦出现破损或变形请勿再继续使用。
- 8.建议一次佩戴隐形眼镜最长不超过12小时。

②

封底

【售后服务】

东莞市洁康超声波设备有限公司
售后电话：0769-89790809

国际认证



【技术规格】

型号	CE-3500	电压	5V1A
外观尺寸	98X86X45(mm)	功率	2.5W
内置电池	1800mA	正常清洗时间	2分钟自动关机
单个槽容积	2ml	加强清洗时间	5分钟自动关机
净重	153g	超声波频率	58KHz

【操作指南】

- 1.初次使用前建议先充电3小时。
- 2.先洗净双手，然后用温开水或者纯水洗干净内胆。
- 3.将隐形眼镜的清洗液(功能水或生理盐水或纯净水)装至清洗机不锈钢槽的上端边缘，不要装太满。

③

禁止使用自来水清洗镜片！每次清洗只能使用新鲜的清洗液(功能水或生理盐水或纯净水)。禁止重复使用清洗液！

- 4.用镊子将左、右眼镜片分别放入左、右边的清洗槽内。
- 5.按"2 Min."键，指示灯亮，表示清洗已开始，清洗机持续2分钟后自动断开。

在清洗过程中，清洗机中发出的轻微的“滋滋”声音，表示清洗正在进行，属正常现象。

- 6.镜片加强清洗，按“5 Min.”键，指示灯亮，表示加强清洗已开始，清洗机持续5分钟后自动断开。

④

温馨提示：

开机时红灯闪烁三次，或者工作时红灯闪烁三次后停止工作，说明机器电量低。此时请用充电器对机器进行充电。充电时红灯闪烁，充电完成后绿灯亮。充电过程大约为3小时。

【保养与维修】

- 1、充电完毕请拔掉USB电源插头。
- 2、倒空内槽，洗干净内胆，不允许有清洗液残留物聚集在槽内。
- 3、用干净的布或绢纱擦干清洗机不锈钢内槽及机身。
- 4、将产品放置于阴凉干燥的地方保存。
- 5、请到指定维修地点进行维修。

⑤

扫描二维码，关注洁康公司公众号，了解更多产品及活动信息



*本品最终解释权归东莞市洁康超声波设备有限公司所有

⑥