

CE-3200

超声波隐形眼镜清洗机

使用手册



利用超声波原理,快速清除隐形眼镜表面的蛋白沉淀,无需功能水长时间浸泡。

特性:

1. 2分钟快速清除蛋白沉淀
2. 5分钟强力清洗
3. 安静便携式,可适应国际电压
4. 超声波频率:46KHz
5. 7W

■ 请在使用本产品前阅读《使用手册》

■ 请保存好此《使用手册》

名称	超声波隐形眼镜清洗机	电压	AC100-240V 50/60Hz DC12V 1A
型号	CE-3200	功率	7 W
外观尺寸	98X72X48(mm)	正常清洗时间	2分钟自动关机
清洗槽容积	4ml	加强清洗时间	5分钟自动关机
净重	193g	超声波频率	46KHz

安全措施

请在使用本机前仔细阅读以下内容



请提高警惕以防止发生触电意外

1. 用完产品后立即拔掉插头。
2. 沐浴时请勿使用产品。
3. 请将产品放在安全的地方,防止掉入水中或其它液体中。
4. 不要将产品完全浸入水中或其它液体中。
5. 当产品掉入水中,请不要用手去触摸产品,应立即拔掉电源。
6. 当受到电磁干扰时,可能会引起产品被关机或不能被关机,如有发生,请按照《使用手册》重新操作即可。



请注意以下事项以防止发生火灾及人员伤亡

1. 请按使用手册正确使用产品,切勿私自使用配件或使用厂家未曾建议的配件。
2. 请勿使用插线或已损坏的AC电源转换器,若产品不能正常工作、损坏或掉入水中,请将损坏的产品拿到指定维修点进行检修。
3. 在无人照看时,请勿将产品插上电源。
4. 此产品不是玩具,请将产品储藏在小孩不能碰及到的地方。
5. 产品远离热源,并放置于干燥、平坦的表面。
6. 睡觉、打瞌睡时请勿使用本产品。


产 品 简 介

传统的隐形眼镜清洗均采用功能水浸泡，并利用功能水的逐步溶解蛋白能力，以清除附着在隐形眼镜表面的蛋白沉淀，达到清洗隐形眼镜的目的，但这个过程通常需要6-8小时以上。


利用超声波原理，并采用特殊的高频（46KHz）可以在2分钟内彻底清除蛋白沉淀，并可有效保护镜片。另，超声波有一定的杀菌功能，经它清洗后，可更好地呵护眼睛。选择“5分钟强力清洗”进行清洗，杀菌功能更强、清洗更彻底。

实例效果对比图

在17倍角膜接触镜投影仪下的实物照片

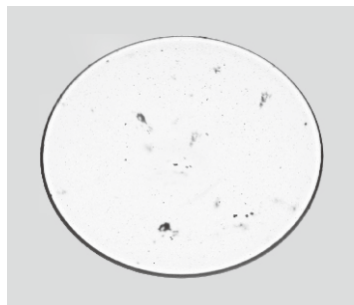


清洗前的隐形眼镜

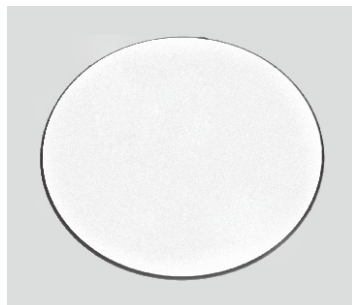


清洗后的隐形眼镜

警告


除功能水、生理盐水及纯净水外，不得在清洗槽中加入其它化学药剂。

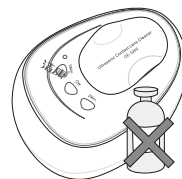


槽内加水适量，避免水溢出槽外。

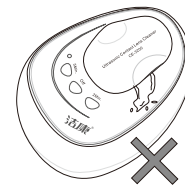


避免产品空烧，否则会损坏产品。

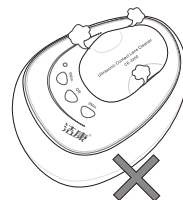

为保持清洗槽清洁、防止交叉感染、更好地保护眼睛，此机器不得用于清洗其它物品。

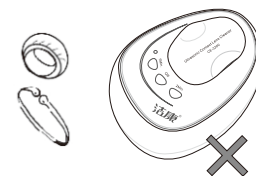



禁止用水冲洗整个产品，以防发生漏电或损坏机器。

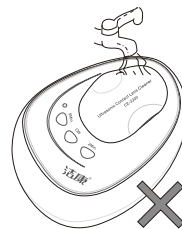

若清洗机未能正常工作，禁止继续操作，非专业人员请勿轻易拆装产品。



产品及配件示意图

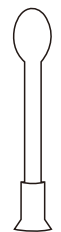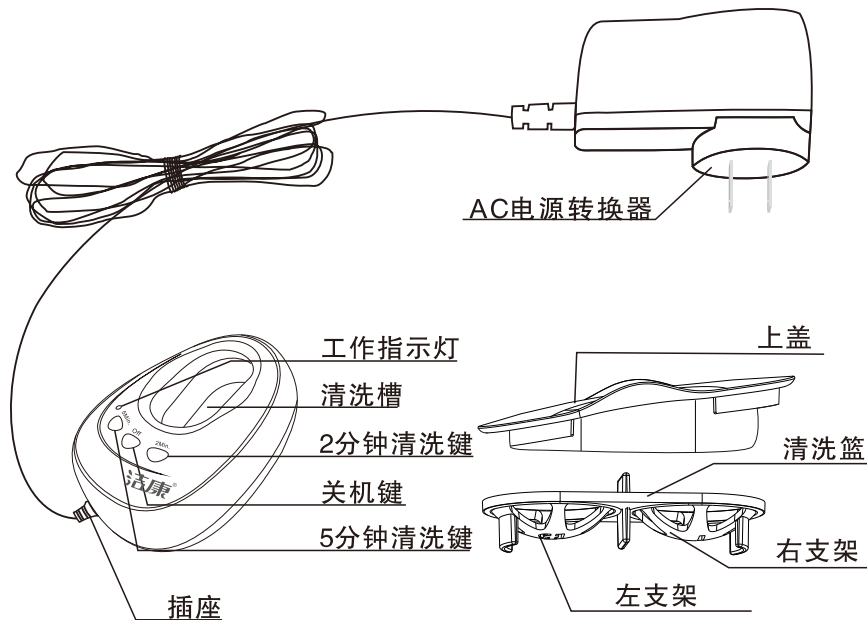


吸盘



镊子




功能水瓶

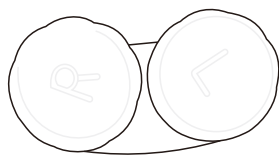


镜盒


操作指南

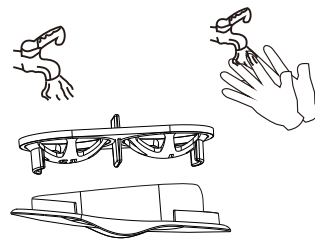

1.先洗净双手，然后用温开水或者纯水洗干净篮子、内胆和盖子。

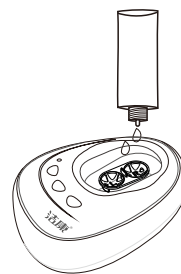



2.把篮子放入清洗机中，将隐形眼镜的护理液（生理盐水或者纯净水）装入清洗机不锈钢槽的上端边缘，不要装太满。

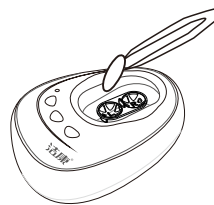

3.用镊子将左眼镜片放在“L”标记的清洗篮上，同样用镊子将右眼镜片放入另一个清洗篮上。



4、盖上盖子。

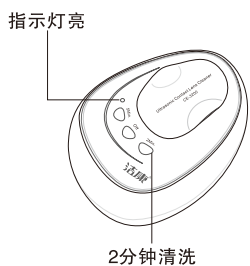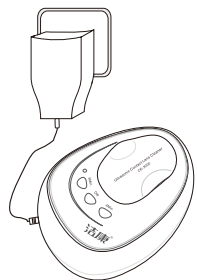


5、将本产品自带的AC电源转换器插头一端插入清洗机，另一端插入电源插座。

6、按“2 Min.”键，指示灯亮，表示清洗已开始，清洗机持续2分钟后自动断开。

⚠ 在清洗过程中，清洗机中发出的轻微的“滋滋”声音，表示清洗正在进行，属正常现象。

加强清洗操作

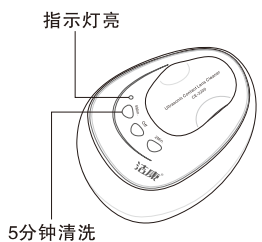


⚠ 镜片加强清洗，按“5 Min.”键，指示灯亮，表示加强清洗已开始，清洗机持续5分钟后自动断开。

⚠ 在触摸隐形眼镜或接触清洗机内部之前，请洗手

⚠ 不要使用自来水去清洗或冲洗你的镜片，每天清洗须使用新鲜的功能水（或生理盐水、纯净水），不要重复使用它。

保养与维护

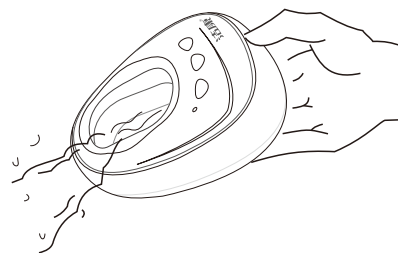

1、拔掉AC电源转换器插头。

2、倒空内槽，不允许有清洗液残留物聚集在槽内。

3、用干净的布或绢纱擦干清洗机不锈钢内槽及机身。

⚠ 禁止用水直接冲洗产品，以防止损坏和漏电。

4、从清洗机中取出的上盖清洗篮，可放入流水中冲洗。

5、将干净的上盖清洗篮放回清洗机中。

6、将产品放置于阴冷干燥的地方保存。

7、请到指定维修地点进行维修。